

scala®
Liendreras eléctrica SC 04



E Instrucciones de uso

FINALIDAD

- La liendreras eléctrica SC 04 no es un aparato médico.
- El aparato mata sólo piojos adultos. No mata los huevos (liendres) y los piojos en estado de larva.
- Utilice el aparato sólo sobre el cabello seco.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Léase detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por primera vez.
- Guarde las instrucciones de uso para su consulta posterior.
- No toque el peine de metal con los dedos cuando el aparato esté en funcionamiento.

- No utilice nunca el aparato en la boca, nariz, cejas, piel desnuda o en otros puntos sensibles del cuerpo.
- El aparato no es adecuado para las personas que padezcan de epilepsia, del corazón o de caída del pelo.
- Si se van a tratar piojos en el pelo de niños, sólo debe hacerlo una persona adulta.
- La liendreras eléctrica puede afectar al funcionamiento de aparatos que el usuario lleve sobre el cuerpo o dentro de él.
- Evite utilizarla con cabellos muy grasos.
- Evite las caídas o los golpes fuertes.
- Evite el contacto del aparato con líquidos. No es impermeable.

NOTAS A OBSERVAR


- Utilice sólo las pilas indicadas en la sección "Datos técnicos" de estas instrucciones de uso.
- Saque la pila si no se va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA LIENDRERA ELÉCTRICA

La electrónica del aparato aplica una tensión que no es peligrosa para las personas. Cuando se pasa el peine de metal por el cabello seco y se toca un piojo adulto, la tensión es suficiente para matarlo.

El LED de señal indica que se ha detectado y matado un piojo. En tal caso, apague el aparato y retire el piojo muerto del peine de metal (véase página 4). Se recomienda tratar el cabello con la liendreras cada 2 días. De este modo se asegura que después de 3 a 4 semanas todos los piojos que al principio del tratamiento se encontraban aún en estado de huevo o de larva se maten también.

EL APARATO

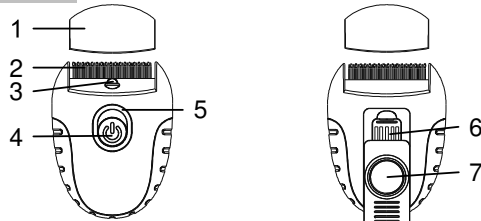


1 Tapa protectora, 2 Peine de metal
3 Luz LED, 4 Tecla de función, 5 LED de señal, 6 Cepillo, 7 Lupa

LA TECLA DE FUNCIÓN

La tecla de función (4) tiene tres posiciones:


1. Control de tensión de la pila

La tecla de función se desliza hacia delante (hasta la posición media). El LED de señal debe lucir en verde. Si la tensión de la pila no es suficiente para el funcionamiento del aparato, el LED de señal luce en rojo.

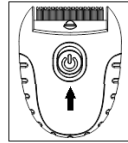


2. Estado de funcionamiento/Luz LED

Deslice la tecla de función completamente hacia delante. El aparato se puede utilizar ahora y el peine de metal se puede utilizar.

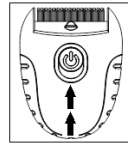

3. OFF:

La tecla de función se lleva a la posición inicial. El LED de señal que indica la disponibilidad para funcionar se apaga.

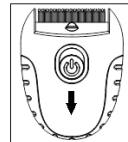

E-3


SOBRE EL USO DE LA LIENDRERA ELÉCTRICA

Condiciones para una aplicación efectiva:

- El cabello debe estar seco.
- En el cabello no deben encontrarse productos de styling.
- Las púas del peine de metal no deben estar dobladas ni tocarse.

La aplicación:


1. Quite la tapa protectora transparente del aparato.

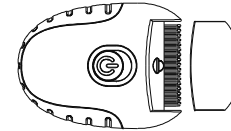

2. Deslice la tecla de funcionamiento a la posición de estado de funcionamiento/luz LED. El LED verde debe lucir. De no ser éste el caso, se debe cambiar la pila (véase página 5).

Sujete el peine de metal en un ángulo de 45° (la tecla de función se encuentra en el lado opuesto al pelo - véanse figuras) y comience a peinar. Las puntas del peine de metal deben llegar a las raíces del cabello. La luz LED es de especial ayuda para detectar piojos en el cabello oscuro.

Cuando se mata un piojo, el LED de señal luce en rojo. El aparato se debe apagar y el piojo se debe sacar del peine con ayuda del cepillo.

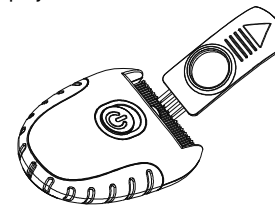


Seguidamente, puede continuar con el tratamiento.

E-4

CAMBIO DE LA PILA

Para funcionar correctamente, el aparato necesita una pila alcalina AAA (LR03) convencional. No utilice pilas de cinc-carbono (R03) ni pilas recargables del mismo tamaño. Observe la correcta polaridad cuando cambie la pila.

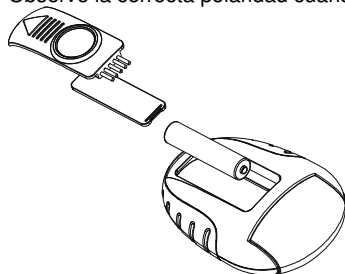


Para cambiar la pila, retire el cepillo para obtener acceso a la tapa del compartimento de la pila. Sustituya la pila gastada.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Limpeza:

- El peine de metal se debe limpiar con el cepillo. La limpieza se debe realizar con la liendrería SC 04 apagada.

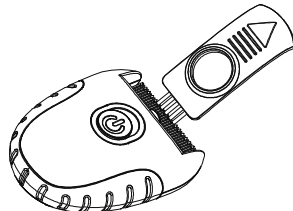

- No utilice líquidos para limpiar el aparato. Recomendamos limpiar el aparato ocasionalmente con un disco de algodón con alcohol de la farmacia.

Conservación:

- Guarde siempre el aparato con la tapa protectora puesta.
- Evite los entornos sucios, húmedos y calurosos.

INDICACIONES PARA EL RECICLAJE



Transcurrida la vida útil del aparato, llévelo, por favor, a un centro de recogida comunal de aparatos eléctricos para eliminarlo en la debida forma.

Las pilas tienen que ser eliminadas debidamente. Para este fin hay recipientes para recoger las pilas en los comercios que venden pilas y en los centros de recogida comunales.

SIMBOLOS

	Fabricante
	Cumple con los estándares de la UE
	Indicaciones para el reciclaje
	Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo
	hecho mes/año
	Proteger de humedad

GARANTÍA:

Tenemos la garantía legal. Garantizamos por la perfecta calidad de este artículo. Dentro del período de garantía subsanamos gratuitamente todos los fallos de material o de manufactura. Si contra toda previsión surge alguna deficiencia, por favor, envíe el artículo al Servicio postventa. Para que se pueda resolver rápidamente el problema, adjunte, por favor, el comprobante de compra y una breve descripción del fallo.

Quedan excluidos de la garantía aquellos daños que se deben a un tratamiento inadecuado (alta contaminación) o que están relacionados con la pila y el embalaje.

DATOS TÉCNICOS

Condiciones de funcionamiento: 10 ° C - 40 ° C,
25% -80% de HR. humedad
Dimensiones: 90 x 60 x 27 mm
Peso: 42 g (sin batería)
Tipo de pila: 1 unidad: AAA LR03



K-jump Health Co. Ltd.
No. 56, Wu Kung 5th Rd.
New Taipei City 24890
Taiwan

**Importador /
Servicio postventa**
SCALA Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95
14532 Stahnsdorf
Germany