

scala®

## Elektrische luizenkam SC 04



(NL) Gebruiksaanwijzing

### **GEBRUIKSDOELEINDE**

- De elektrische luizenkam is geen medisch hulpmiddel.
- Het apparaat doodt alleen volwassen luizen. Eieren (neten) en luizen in het larvenstadium worden niet gedood.
- 

### **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voor het eerste gebruik.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek ter inzage.
- Raak de metalen kam niet aan met de vingers wanneer het apparaat in werking is.
- Gebruik het apparaat alleen op het droge haar.
- Gebruik het apparaat nooit op de mond, neus, ogen,

wenkbrauwen, de naakte huid of andere gevoelige lichaamsdelen.

- Het apparaat is niet geschikt voor personen, die lijden aan epilepsie, hartklachten of haaruitval. Wanneer kinderen hoofdluizen krijgen, dan is de bestrijding uitsluitend toegestaan door een volwassen persoon.
- De elektrische luizenkam kan elektronische apparaten beïnvloeden die de gebruiker op of in het lichaam draagt.
- Vermijd het gebruik bij zeer vettig haar.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet valt of wordt blootgesteld aan krachtige stoten.
- Vermijd dat het apparaat in contact komt met vloeistoffen. Het is niet waterdicht.

### **VERDER IN ACHT TE NEMEN**


- Gebruik alleen batterijen die in deze gebruiksaanwijzing aangegeven zijn onder "Technische gegevens".
- Verwijder de batterij als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.

### **WERKWIJZE VAN DE ELEKTRISCHE LUIZENKAM**

De elektronica van het apparaat brengt een voor de mens ongevaarlijke spanning over op de metalen kam. Wanneer u met de metalen kam door het droge hoofdhaar gaat en een volwassen hoofdlius aanraakt, dan volstaat de spanning om het ongedierte te doden. De signaal-LED geeft aan dat er een luis werd gedetecteerd en gedood. Vervolgens schakelt u het apparaat uit en verwijdert u de gedode luis uit de metalen kam (zie pagina 4). Het is aan te bevelen om het hoofdhaar om de 2 dagen te behandelen met de luizenkam. Zo is verzekerd dat na 3 tot 4 weken alle luizen werden gedood, die zich bij het begin van de behandeling nog in het ei- of larvenstadium bevonden.

NL-2

## HET APPARAAT

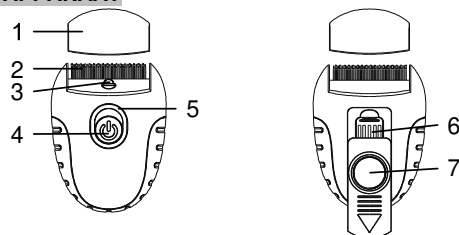


1 Beschermkap, 2 Metalen kam 3 LED-spotlight,  
4 Functietoets, 5 Signaal-LED, 6 Borstel, 7 Vergrootglas

## DE FUNCTIETOETS

De functietoets (4) heeft drie standen:


### 1. Controle van de batterij-spanning:

De functietoets wordt een beetje naar voor (in de middelste positie) geschoven. Het groene lampje in de signaal-LED moet branden. Als de batterij-spanning niet meer volstaat voor de werking van het apparaat, dan brandt het rode lampje in de signaal-LED.

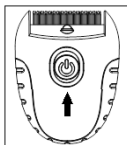


### 2. Bedrijfsstoestand/LED-spotlight

Schuif de functietoets helemaal naar voor. Het apparaat is nu gebruiksklaar en de metalen kam wordt verlicht.

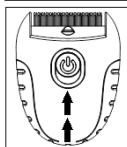

### 3. UIT:

De functietoets wordt in de uitgangspositie gebracht. De signaal-LED als indicatie van de gebruiksklare toestand dooft.

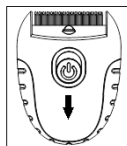

NL-3


## HET GEBRUIK VAN DE ELEKTRISCHE LUIZENKAM

### Voorwaarden voor het doeltreffende gebruik:

- Het haar moet droog zijn.
- Er mogen geen stylingproducten aanwezig zijn in het haar.
- De tanden van de metal kam mogen niet verbogen zijn of elkaar raken.

### Het gebruik:


1. Verwijder de doorzichtige beschermkap van het apparaat.

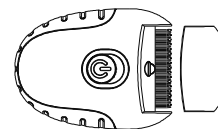

2. Schuif de functietoets in de positie bedrijfstoestand/LED-spotlight. De groene LED moet branden. Anders is een vervanging van de batterij (zie pagina 5) noodzakelijk.

Houd de metalen kam in een hoek van 45° (de functietoets bevindt zich aan de zijde die van het haar afgewend is – zie afbeeldingen) en begin met kammen. De punten van de metalen kam moeten beginnen aan de haarwortels. De LED-spotlight is in het bijzonder bij donker haar handig om de luizen te kunnen zien.

Als er een luis werd gedood, dan gaat het rode lampje in de signaal-LED branden. Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de luis moet uit de metalen kam worden verwijderd met de borstel.

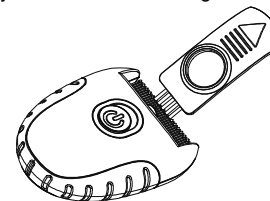


Het gebruik kan vervolgens worden voortgezet.

NL-4

### **BATTERIJ VERVANGEN**

Het apparaat heeft voor een foutloze werking een in de handel verkrijgbare AAA alkalinebatterij (LR03) nodig. Gebruik geen zink-koolbatterij (R03) of een accu van hetzelfde type. Houd bij het vervangen van de batterij rekening met de polariteit!

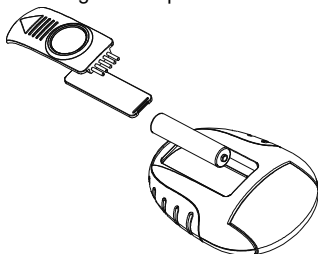


Voor het vervangen van de batterij verwijdt u de borstel met het vergrootglas. Het deksel van het batterijvak is dan toegankelijk. Vervang de lege batterij.

### **REINIGING EN BEWARING**

#### Reiniging:

- De metalen kam moet met de borstel worden gereinigd. De reiniging moet plaatsvinden in uitgeschakelde toestand van de luizenkam SC 04.

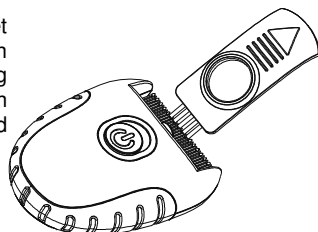

- Gebruik geen vloeistoffen voor de reiniging van het apparaat. Wij raden aan om het apparaat met een alcoholpad uit de apotheek met heen- en weergaande bewegingen schoon te vegen.

NL-5

#### Bewaring:

- Bewaar het apparaat steeds uitsluitend met een aangebrachte beschermkap.
- Vermijd een omgeving met vuil, vocht en hoge temperaturen.

### **AANWIJZINGEN VOOR AFVALVERWIJDERING**



Na de gebruiksduur dient u het apparaat vakkundig te verwijderen via een openbare inzamelplaats voor oude elektrische toestellen.



Batterijen moeten als speciaal afval worden verwijderd. Daarvoor zijn in winkels waar batterijen worden verkocht evenals in gemeentelijke verzamelpunten speciale containers beschikbaar.

### **VERKLARING VAN DE SYMBOLEN**

	<b>Fabrikant</b>
	<b>konform de EU-regels</b>
	<b>Aanwijzingen voor afvalverwijdering</b>
	<b>Gebruiksaanwijzing lezen!</b>
	<b>Productiemaand en -jaar</b>
	<b>Beschermen tegen vocht</b>

NL-6

### **GARANTIE**

Wij zorgen voor de wettelijke garantie. Tijdens de garantieperiode wordt het defecte apparaat gratis hersteld. Na afloop van de garantieperiode hebt u eveneens de mogelijkheid om een defect apparaat door de klantendienst te laten herstellen. U ontvangt vooraf een voor u gratis kostenraming.

De garantie heeft geen betrekking op schade, die terug te voeren is op ondeskundige behandeling, als sterk vervuilde, ongevallen, slijtage, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing of veranderingen aan het apparaat door derden. Onder de garantie valt niet: verpakking, batterijen en de gebruiksaanwijzing.

### **TECHNISCHE DATA**

Operating voorwaarden: 10 ° C - 40 ° C,  
25% -80% RH. vochtigheid  
Afmetingen: 90 x 60 x 27 mm  
Gewicht: 42 g (zonder batterij)  
Voeding: 1 x AAA-alkali-batterij (LR03)



K-jump Health Co. Ltd.  
No. 56, Wu Kung 5th Rd.  
New Taipei City 24890  
Taiwan

### **Importeur / Klantendienst**

SCALA Electronic GmbH  
Ruhlsdorfer Str. 95  
14532 Stahnsdorf  
Germany