


scala®

## Elektrický odšívovací hrebeň SC 04



 Návod na Používanie

### UPOZORNENIE

Pre bezpečné a správne použitie odšívovacieho hrebeňa si, prosím, pozorne prečítajte tento návod.

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


1. Elektrický odšívovací hrebeň SC 04 nie je lekársky prístroj.
2. Elektrický odšívovací hrebeň SC 04 musí byť používaný na deťoch iba dospelou osobou.
3. Prístroj nie je vode odolný.
4. Keď je prístroj ZAPNUTÝ, nedotýkajte sa prstami kovového hrebeňa.
5. Niektoré citlivé osoby môžu pociťovať mierne brnenie; NEJDE o nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

6. Elektrický odšívovací hrebeň SC 04 nesmie byť používaný alebo aplikovaný na osobách trpiacimi epilepsiou a/alebo na pacientoch so srdcovým zlyhávaním.
7. Elektrický odšívovací hrebeň SC 04 môže narušiť prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov.

### AKO ELEKTRICKÝ ODŠÍVOVACÍ HREBEŇ FUNGUJE?

Pri prečesávaní suchých vlasov prístroj vysiela malý elektrický náboj ku kovovému hrebeňu, ktorý usmrčuje dospelé vši. LED kontrolka elektrického odšívovacieho hrebeňa bude svietiť na červeno, pokiaľ bola voš detegovaná, usmrtená a zachytená v kovovom hrebeni. V tomto prípade jednoducho odstráňte voš pomocou malej kefy (6). Elektrický odšívovací hrebeň neusmrť vajíčka vši, niektoré z nich môžu zostať uchytené na vlasoch. Preto sa odporúča, aby ošetrovanie elektrickým hrebeňom bolo zopakované každé 2 – 3 dni po dobu 16 dní, aby boli odstránené vyľiahnuté vši.

### POPIS PRÍSTROJA

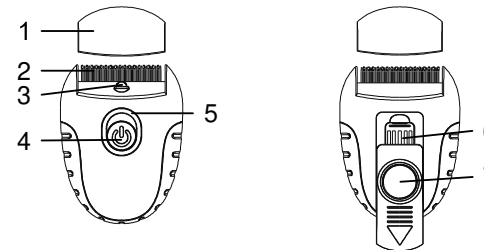

- 1 Kryt hlavice, 2 Kovový hrebeň, 3 LED bodové svetlo, 4 Prepínač O/I, 5 LED kontrolka, 6 Malá kefa, 7 Lupa

SK-2

### **FUNKCIA PREPÍNAČA O/I (4)**

Funkčné tlačidlo – prepínač – má 3 polohy: poloha: Kontrola stavu batérie  
Posuňte prepínač (4) podľa obrázku do strednej polohy.


Prístroj sa zapne a kontrolka prepínača bude svietiť

na zeleno. V prípade, že kapacita batérie je nedostatoč- ná, bude kontrolka prepínača svietiť po dobu 5 sekúnd na červeno a potom sa prístroj vypne.

poloha: Prevádzkový režim / LED osvetlenie  
Úplne posuňte prepínač (4) smerom k hrebeňu. Prístroj je pripravený na prevádzku, kontrolka svieti na zeleno a LED osvetlenie hrebeňa svieti.

poloha: Vypnutie

Prepínač posuňte do východiskovej polohy (smerom od hrebeňa). Prístroj a kontrolka prevádzky sa vypne.

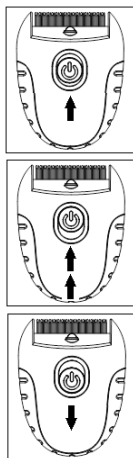

### **POUŽÍVANIE HREBEŇA**


#### Pred použitím prístroja:

Vlasy musia byť suché a čisté. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by mali byť vlasy bez stylingových prípravkov (napríklad pena, gél a pod.).


SK-3

#### Pred ošetrováním:

Dôkladne prečešte vlasy hrebeňom, ktorý pravidelne používate, aby vlasy neboli zauzlené.

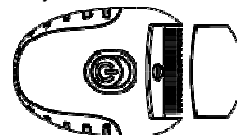

1. Odstráňte kryt hlavice (1). Pre zapnutie prístroja posuňte prepínač do strednej pozície, kontrolka prepínača bude svietiť na zeleno. Posuňte prepínač do 3. pozície, aby sa zaplo LED bodové svetlo.
2. Uchopte hrebeň pod uhlom 45 stupňov (prepínač O/I musí smerovať smerom k užívateľovi) a začnite česanie kovovým hrebeňom od vlasových koreňkov. LED bodové svetlo vám pomôže pri uvidieť voš pri slabšom osvetlení alebo pri osobách s tmavými vlasmi.
3. Ak je hrebeňom voš zachytená a usmrtená, kontrolka prepínača zasvieti na červeno.
4. Prerušte česanie vlasov a odstráňte voš z kovového hrebeňa. Na vyčistenie kovového hrebeňa použite malú kefku (6). Keď je voš odstránená z hrebeňa, LED kontrolka sa rozsvieti na zeleno a hrebeň je opäť pripravený na použitie.
- 5.

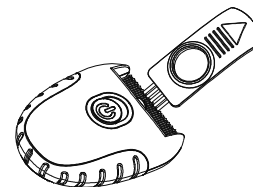

SK-4

## **BATÉRIA**

### *Upozornenie:*

Odvšivovací hrebeň je napájaný jednou batériou AAA.

Batéria musí byť uložená mimo dosahu detí.


Vždy používajte batériu určeného typu a špecifikácie, uvedené v tomto návode.

Vytečená batéria môže poškodiť prístroj. Odporúčame z prístroja vybrať batériu, ak sa prístroj nebude dlhšiu dobu používať.

Batérie vždy likvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi. Nevyhadzujte batérie do bežného domového odpadu.

## **VÝMENA BATÉRIE**

Ak chcete vymeniť batériu, posuňte kryt batérie a vyberte batériu. Batériu je nutné vložiť tak, ako je uvedené vo vnútri priestoru pre batérie.

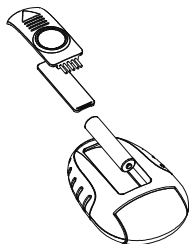


## **ČISTENIE A USKLADNENIE**

### *Čistenie:*

Kovový hrebeň je možné čistiť pomocou dodanej malej čistiacej kefky.

Vypnite prístroj a obráťte kovový hrebeň smerom nadol. Na vyčistenie kovového hrebeňa použite vatový tampón alebo mäkkú bavlnu navlhčenú v roztoku 70%alkoholu.

Uchovávajte prístroj v suchu a mimo dosahu akýchkoľvek tekutín.

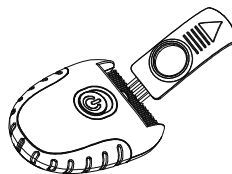

SK-5

### *Uskladnenie:*

Pokiaľ prístroj nepoužívate, skladujte ho na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Vyhnite sa extrémnym teplotám. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať.

## **INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII**



Chybné prístroje alebo prístroje, ktoré sú vyradené z prevádzky na konci svojej životnosti, môžu stále obsahovať materiály, ktoré by mohli predstavovať riziko pre životné prostredie. Zlikvidujte, prosím, prístroj vhodným a správnym spôsobom na zbernom mieste pre staré elektrické spotrebiče.









Batérie musia byť správne zlikvidované. Kontajnery na likvidáciu batérií sú dispozíciou u predajcov batérií a na zberných miestach komunálneho odpadu.

## **ZÁRUČNÁ DOBA**

Poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 2 roky. Zaručujeme dokonalé vyhotovenie tohoto výrobku. Počas záručnej doby opravíme všetky chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pokiaľ sa chyby v rozpore s očakávaním vyskytnú, pošlete prosím prístroj späť vášmu predajcovi. Priložte doklad o zakúpení a popis chyby, aby bolo možné problém napraviť čo najskôr.

SK-6

**VYSVETLIVKY K SYMBOLOM**

	Výrobca
	V súlade s pravidlami EÚ
	Informácie o likvidácii
	Prečítajte si návod na používanie
	Vyrobené: mesiac/rok
	Uchovávajte v suchu

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Prevádzkové prostredie:	10–40 °C,
pri relatívnej vlhkosti:	25–80 %
Rozmery:	90 x 60 x 27 mm
Hmotnosť:	42 g (bez batérie)
Batéria:	1 x AAA alkalická batéria (LR03)



K-jump Health Co. Ltd.  
56, Wu Kung 5th Rd.  
New Taipei City 24890  
Taiwan

**Distribúcia v SR**

INTERPHARM Slovakia, a. s.No.  
Uzbecká 18/A  
821 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 40 200 400