

# scala®

## Pilleæske

- Kvarts-nøjagtigt klokkeslæt,
- op til 5 alarmtider dagligt,
- alarm: akustisk, vibrerende eller akustisk og vibrerende



DK Brugsvejledning



## Pilleæske med 5 alarmtider

Tillykke med købet af dette Scala-kvalitetsprodukt. For at kunne benytte dig af pilleæskens mange fordele, bør du starte med at læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, inden du tager den i brug. Husk at opbevare vejledningen til evt. senere brug.

### Særlige funktioner:

Denne pilleæske hjælper dig med at planlægge og holde styr på dit daglige pilleindtag og minder dig om hvornår du skal tage din medicin (justerbare alarmtider).

Yderligere fordele:

- Indbygget kvartsur med stort LCD-display (talstørrelse: 13 mm).
- 5 daglige alarmtider kan programmeres. Når de er blevet programmeret, gentages alarmtiderne dagligt.
- Alarmen er akustisk, vibrerende eller akustisk og vibrerende.
- Den blå belysning gør det nemt at benytte pilleæskens, når det er mørkt.

### Sikkerhedshenvisninger / Tilsigtet formål:

- ♦ Pilleæskens indeholder smådele (batterier m.v.), der kan sluges af småbørn og dermed udgør en livsfare. Opbevar derfor pilleæskens utilgængeligt for børn. Hvis nogen er kommet til at sluge et batteri m.v., skal der søges læge straks.
- ♦ Pilleæskens beskyttes mod direkte sollys, temperaturer over 50°C samt indtrængende vand.
- ♦ Pas på, at du ikke kommer til at tabe pilleæskens. Luk kun æskens op ved batteriskift eller hvis den skal resettes pga. fejlfunktion o. lign.
- ♦ Må kun benyttes som pilleæske. Enhver anden brug betragtes som værende i strid med formålet og er derfor ikke godkendt af producenten.

### Informationer vedr. Bortkastning




Efter apparatets brugstid bortkastes det fagligt korrekt via et kommunalt indsamlingssted for gamle elektroniske apparater.



Batterier skal bortkastes fagligt korrekt. Til dette formål findes der i butikker, der sælger batterier samt på de kommunale indsamlingssteder, beholdere til bortkastning af batterier.

## Pilleæske

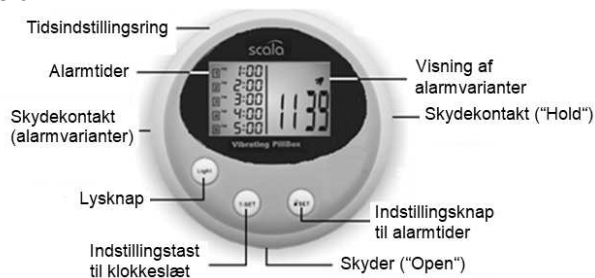


**Inden pilleæsken tages i brug: Luk æsken op (med skydekontakt "OPEN"), luk herefter batterirummet op og fjern de to beskyttelsesstrimler fra batterierne.**


## Isætning/Udskiftning af batteri


Pilleæsken er udstyret med 2 batterier. Lithium-batteriet af typen CR 2025 eller CR 2032 leverer strøm til uret, AAA-batteriet (LR03) kræves til alarmfunktionerne (akustisk, vibrerende eller akustisk og vibrerende) og belysning af LCD-displayet.

Hvis batterierne skal udskiftes, åbnes pilleæsken ved hjælp af skydekontakten "OPEN" på siden af æsken (skub i pilens retning). Der er nu adgang til batterirummet i æskens øverste del. Sørg for at batterierne lægges rigtigt i! Batteriskift kræves, når LCD-displayets kontrast aftager eller når belysningen eller alarmerne bliver svagere.

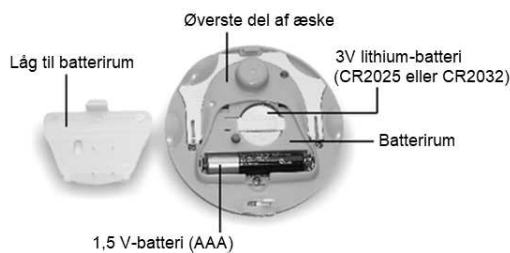


#### Indstilling af klokkeslæt

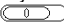1. Skub skydekontakten "HOLD" på siden af æsken over i position:  HOLD ▶
2. Tryk på indstillingsknappen for klokkeslæt (T-SET) i ca. 3 sek. På LCD-displayet kommer nu **T-SET** til syne, og sekunderne blinker.
3. Du kan nu indstille timerne ved at dreje på tidsindstillingsringen.
4. Tryk igen på indstillingsknappen for klokkeslættet (T-SET), minutterne begynder at blinke. Indstil minutterne med tidsindstillingsringen.
5. Med yderligere tryk på T-SET-knappen afsluttes tidsindstillingen. På LCD-displayet slettes **T-SET**.

Når du skubber skydekontakten "HOLD" over i position  HOLD ▶ vil alle knapper være uden funktion, dvs. skydekontakten sikrer mod utilsigtet brug af tasterne.

#### Indstilling af de 5 alarmtider

1. Skub HOLD-skydekontakten på siden af pilleæsken over i position:  HOLD ▶ .
  2. Tryk på "SET"-knappen nedenfor LCD-displayet i ca. 3 sek. På LCD-displayet kommer der til at stå **AL-SET** og 1. alarmtid "1" -:-" blinker.
  3. Ved at dreje på tidsindstillingsringen kan den første alarmtid indstilles i trin à 30 min.
  4. Tryk nu igen på "SET"-knappen og afslut indstilling af 1. alarmtid. Den næste alarmtid "2" -:-" blinker.
- Du kan indstille 2. (3., 4. og 5.) alarmtid på samme måde som 1. alarmtid ved hjælp af tidsindstillingsringen. Har du kun brug for en enkelt alarmtid, går du med "SET"-knappen videre til 5. alarmtid, hvorefter du afslutter indstilling af alarmtid med endnu et tryk på "SET"-knappen. På LCD-displayet **AL-SET** slettes.

Når du har afsluttet programmering af alarmtider, skubber du igen skydekontakten "HOLD" over i position  HOLD ▶ .

#### Reset af alle alarmtider (også ved fejlfunktioner)

Luk pilleæsken op ved at skubbe skydekontakten "OPEN ▶" på siden af æsken i pilens retning. Tryk herefter en tandstik eller lignende ned i åbningen "RESET" for at resette alle alarmtider. Klokkeslæt og alarmtider er herefter klar til at blive indstillet på ny.



#### Fyldning af pilleæske med medicin


På bagsiden har pilleæsken fem nummererede rum til medicin. Rummene åbnes, når du drejer det gennemsigtige låg rundt. Herefter kan du fylde rummene med din medicin. Når du hører alarmsignalet, tager du medicinen ud af det pågældende rum (f.eks. alarmtid 1 - rum 1 osv.).

Nummerering af pillerum



Låg til pillerum

#### Belysning af LCD-display

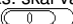Hvis belysningen af LCD-displayet f.eks. skal være tændt i ca. 10 sek., skubber du først HOLD-skydekontakten over i position:  HOLD ► hvorefter du trykker på lysknappen "Light".

#### Indstilling af alarmtype

Ved hjælp af skydekontakten "BEEP VIB BEEP+VIB" kan du vælge mellem følgende muligheder: Akustisk alarm (BEEP), vibrationsalarm (VIB) eller akustisk alarm med vibration (BEEP+VIB). Valg af alarmtype kan ske uden brug af HOLD-skydekontakten.



#### Alarm / Udtagning af medicin

Når du hører alarmeren er tiden inde til at tage din medicin ud af det pågældende rum ved at dreje låget rundt. Når du gør det, slukkes der for alarmeren samtidigt med at alarmtiden i LCD-displayet går ud. I stedet kommer der til at stå "-:-". Alarmeren hører akustisk eller vibrerende eller begge dele i ca. 30 sek.

Hvis du glemmer at tage din medicin, vil alarmeren gå i gang igen 2 gange med 5 min. mellemrum.

Hvis du tager din medicin ud af pillerummet op til 15 min. før den indstillede alarmtid eller bare drejer låget, undertrykkes alarmeren.

Hvis du er kommet til at overhøre en alarm og glemt at tage din medicin, vil alarmtiden blive stående i LCD-displayet til påmindelse.

Normalt vil det dog være sådan, at du har taget al din medicin og at alle alarmtider i LCD-displayet er skiftet til "-:-". Når klokken er 0:13 (nat), aktiveres de indstillede alarmtider igen, således at pilleæsken arbejder med de samme indstillede alarmtider næste dag.

### Fejl og fejlfhjælpning

1. Luk pilleæsken op ved at skubbe skydekontakten "OPEN ►" på siden af æsken i pilens retning. Tryk herefter en tandstik eller lignende ned i åbningen "RESET" for at resette alle alarmtider. Klokkeslæt og alarmtider er herefter klar til at blive indstillet på ny.



2. Hvis pilleæsken ikke udfører nogle af funktionerne, bør du tjekke batterierne. Under punkt „Isætning/udskiftning af batteri“ kan du se, hvilket batteri der udfører hvilke funktioner.

### Oplysninger om garanti

Vi yder en garanti på 2 år på pilleæske. Kassebonen gælder som dokumentation. Under garantiperioden vil et defekt termometer blive repareret uden betaling. Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert håndtering, uheld, tilsidesættelse af brugsanvisningen eller omforandringer af termometeret ved tredjepart.

### Tekniske data

Driftsspænding	<u>Urfunktion:</u> 3V (1 x CR 2032 eller CR 2025)
	<u>Lys og alarmfunktioner:</u> 1,5V AAA-batteri (LR03)
Ur	Kvartsur, +/- 20 sek./måned
Alarm	valgbart: akustisk, vibrerende eller akustisk og vibrerende
Antal alarmer/dag	5
Pillerum	5
Display	LCD-display med 13 mm talhøjde (klokkeslæt)
Mål	Ø 80 mm, højde 31 mm
Vægt	96 g (inkl. batterier, uden medicin)
Belysning LCD-display	blå

### Salg

SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95  
14532 Stahnsdorf (Germany)

Rev. 07/01/2021/DK

DK - 6