




# Dosett med 4 medicinfack och 5 väckningstider



## Apparatbeskrivning

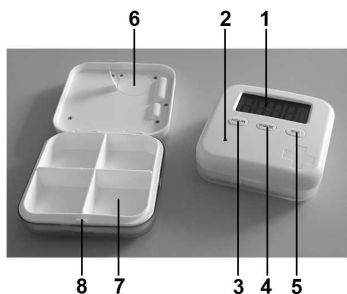

1. LCD-display
2. Öppning för piptoner
3. Timknapp
4. Lägesknapp
5. Minutknapp och start-/stoppknapp för timern
6. Batterifacklock
7. Tablettfack
8. Låsning

## Särskilda egenskaper

1. Fem inställbara väckningstider (de upprepas dagligen)
2. Akustisk väckningssignal (piptoner) samtidigt som apparaten vibrerar
3. Fyra medicinfack
4. Klocka, kan ställas om från 12h-angivelse till 24h-angivelse och omvänt
5. Nedräkningstimer (max. 23 h 59 min)
6. Dosett i format för byxficka

## Komma igång med användningen

### Ställa in klockslaget

1. Öppna dosetten (med låsningen) och dra bort skyddsremsan från batterifacket. Klockan startar med 0:00.
2. Tryck endast **så länge** på lägesknappen tills segmenten i LCD-displayen blinkar.
3. Med timknappen ställer du in timmarna och med minutknappen minuterna.
4. Tryck igen på lägesknappen och tidsinställningen är därmed avslutad.

### Ställa om från 12h-angivelse till 24h-angivelse

Om klockslaget har ställts in, kan du ställa om mellan 12h-angivelse och 24h-angivelse så ofta du vill med timknappen. Tänk på att ett byte märks först när LCD-displayen visar t.ex. P 3:15. P visar eftermiddags- och kvällstimmarna för engelsk tid. Förmiddagstiden visas utan P.

## Ställa in väckningstiderna

### Ställa in den första väckningstiden:

- Tryck **kort** på lägesknappen, på LCD-displayen visas då **---:--** <sup>▲1</sup>
- Därefter trycker du på lägesknappen igen **tills** angivelsen blinkar.
- Med timknappen ställer du in timmarna och med minutknappen minuterna.
- Därefter trycker du på lägesknappen igen, den första väckningstiden är därmed programmerad. Den upprepas nu dagligen. Den måste inte ställas in igen.

### Ställa in fler väckningstider.

När du har ställt in den första väckningstiden, trycker du igen **kort** på lägesknappen för att ställa in ytterligare en väckningstid (på LCD-displayen visas **---:--** <sup>▲2</sup>) tryck sedan igen på lägesknappen **tills** angivelsen blinkar. Med timknappen ställer du in timmarna och med minutknappen minuterna för den andra väckningstiden. Tryck på lägesknappen och den andra väckningstiden är därmed programmerad. Den här proceduren kan du upprepa ytterligare tre gånger för att vid behov programmera alla fem väckningstider. Med lägesknappen kopplar du fram till angivelsen av klockslaget.

## Radera en redan inställd väckningstid

Välj den väckningstid som du vill radera med lägesknappen. Tryck sedan på minutknappen, den valda väckningstiden är därmed raderad.

## Väckningssignalen

När den inställda väckningstiden har kommit, kommer en väckningssignal som varar 10 sekunder samtidigt som apparaten vibrerar. Därefter växlar väckningssignalen till snabba piptoner under 30 sekunder. Om väckningssignalen fortfarande inte stängs av, kommer under 20 sekunder snabba piptoner samtidigt som apparaten vibrerar.

## Stänga av väckningssignalen

Du kan stänga av väckningssignalen genom att trycka på valfri knapp.

## Nedräkningstimern

Tryck på lägesknappen tills du kommer till läget för nedräkningstimern.




Tryck igen på lägesknappen **så länge** tills segmenten i LCD-displayen börjar blinka. Med timknappen ställer du in timmarna och med minutknappen minuterna för den tid som nedräkningen ska hålla på. Tryck igen på lägesknappen och tidsinställningen för nedräkningen är därmed avslutad.

Med minutknappen utlöser du nedräkningen (symbolen  blinkar).

Under den sista minuten för nedräkningen

kopplar LCD-displayen om till de sekunder som är kvar.

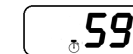

Du kan valfritt stoppa och sätta igång nedräkningen igen genom att trycka på minutknappen. När den inställda nedräkningstiden har gått låter piptonen upp till en minut. Du kan stänga av piptonen genom att trycka på valfri knapp.

## Batteribyte

Batteriet behöver bytas när LCD-displayen eller piptonerna blir svagare. Vänligen använd en litiumknappcell av typen CR2032. Öppna batterifacket genom att ta bort batterifackslocket med hjälp av en liten krysskruvmejsel. Byt ut batteriet och var observant på polariteten när du sätter i. Stäng sedan batterifacket igen.

## Information om avfallshantering



Defekta eller uttjanta apparater kan innehålla rester som skulle kunna utgöra en risk för miljön. Avfallshandla apparaten korrekt som elskrot hos kommunens återvinningscentral.

Batterier måste avfallshandlas fack-mässigt. Batteribehållare finns i handeln som säljer batterier och å på kommunens återvinningsstationer /mijöstationer.

## Garantiinformation

Vi ger en garanti på 2 år på apparaten. Kassakvittot gäller som garantibevis. Under garantitiden repareras den defekta apparaten kostnadsfritt. Garantin gäller inte för skador som beror på felaktig behandling, olyckor, att bruksanvisningen inte efterföljs eller ändringar på apparaten av tredje part.

## Symbolförklaring

	överensstämmer med produktspecifika EU-riktlinjer
	Användningsdel BF
	Information om avfallshantering
	Läs bruksanvisningen
	Tillverkningsdatum (månad/år)

## Försäljning


SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95,  
14532 Stahnsdorf (Germany)  
www.scale-electronic.de

DK

# Pilleæske med 4 pillerum og 5 vækketider

CE

## Beskrivelse af pilleæske

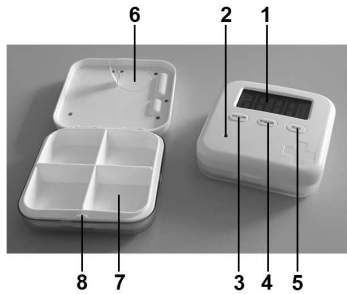

1. LCD-visning
2. Åbning til bip-lyde
3. Time-tast
4. Mode-tast
5. Minut-tast & Start/Stop-tast til timer
6. Låg til batterirum
7. Pillerum
8. Lås

## Særlige egenskaber

1. Der kan indstilles 5 vækketider (gentager sig dagligt)
2. Akustisk vækkelyd (bip-lyde) samtidigt med at æsken vibrerer
3. 4 pillerum
4. Ur kan stilles fra 12h-visning til 24h-visning og omvendt
5. Countdown-timer (max. 23h 59min)
6. Pilleæske i bukselommeformat

## Ibrugtagning

### Indstilling af klokkeslæt

1. Luk pilleæsken op (ved låsen) og træk beskyttelsesstrimlen ud af batterirummet. Uret starter med 0:00.
2. Tryk på Mode-tasten, **indtil** segmenterne på LCD-visningen begynder at blinke.
3. Indstil timerne med Time-tasten og minutterne med Minut-tasten.
4. Tryk på Mode-tasten igen for at afslutte indstilling af klokkeslæt.

### Skift fra 12h-visning til 24h-visning

Når du har indstillet klokkeslættet, kan du efter ønske skifte mellem 12h-visning og 24h-visning ved hjælp af Time-tasten. Værk opmærksom på, at et skift først gør sig bemærket, når der på LCD-visningen f.eks. står P 3:15. P'et angiver eftermiddags- og aften timerne svarende til det engelske klokkeslæt. Formiddagstiden vises uden P.

## Indstilling af vækketider

### Indstilling af den første vækketid:

- Tryk **kort** på Mode-tasten, på LCD-visningen ses **--:--<sup>▲1</sup>**
- Tryk igen på Mode-tasten **indtil** visningen begynder at blinke.
- Indstil nu timerne med Time-tasten og minutterne med Minut-tasten.
- Tryk igen på Mode-tasten. Den første vækketid er nu programmeret. Vækketiden gentager sig automatisk hver dag og skal ikke indstilles igen.

### Indstilling af andre vækketider.

Når du har indstillet den første vækketid kan du indstille yderligere vækketider med **kort** tryk på Mode-tasten (på LCD-visningen vil der stå **--:--<sup>▲2</sup>**). Tryk så igen på Mode-tasten **indtil** visningen begynder at blinke. Indstil nu timerne med Time-tasten og minutterne med Minut-tasten for 2. vækketid. Med yderligere et tryk på Mode-tasten er 2. vækketid programmeret. Denne fremgangsmåde kan gentages yderligere 3 gange, hvis du ønsker at programmere alle 5 tilgængelige vækketider. Ved hjælp af Mode-tasten kan du skifte over til Klokkeslæt-visning igen.

## Sletning af indstillede vækketider

Med Mode-tasten vælges den vækketid, der ønskes slettet. Tryk herefter på Minut-tasten til sletning af den valgte vækketid.

## Vækkealarm

Når den indstillede vækketid er nået, høres 10-sek.-vækkealarm med bip-lyde og samtidig vibration. Derefter skifter vækkealarmen i 30 sek. til en række hurtige bip-lyde. Hvis vækkealarmen ikke er blevet slået fra endnu, høres en række hurtige bip-lyde med samtidig vibration i 20 sek.

## Frakobling af vækkealarm


Vækkealarmen kan frakobles ved tryk på en hvilken som helst tast.

## Countdown-timer


Tryk på Mode-tasten indtil du kommer over i mode for Countdown-timer.



Tryk på Mode-tasten igen **indtil** segmenterne på LCD-visningen begynder at blinke. Indstil nu timerne med Time-tasten og minutterne med Minut-tasten for den tid, der skal gælde for countdown'en. Tryk på Mode-tasten for at afslutte Countdown-tidsindstillingen.

Med Minut-tasten udløses countdown'en (symbolet  blinker)

Når det sidste minut af countdown'en er nået, skifter LCD-visningen til de resterende sekunder.

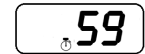

Countdown'en kan til enhver tid stoppes og genstartes med tryk på Minut-tasten. Når den indstillede countdown-tid er nået, høres en bip-lyd i op til 1 minut. Lyden kan slås fra ved at trykke på en hvilken som helst tast.

## Batteriskift

Batteriet skal udskiftes, når LCD-visningen eller bip-lydene bliver svagere. Benyt et lithium-batteri af typen CR2032. Luk batterirummet op ved at fjerne låget ved hjælp af en lille skruetrækker. Udskift batteriet og sørg for at det kommer til at vende i den rigtige retning. Husk at sætte låget på igen når batteriet er blevet sat i.

## Informationer vedr. bortkastning



Efter apparatets brugstid bortkastes det fagligt korrekt via et kommunalt indsamlingssted for gamle elektroniske apparater.








Batterier skal bortkastes fagligt korrekt. Til dette formål findes der i butikker, der sælger batterier samt på de kommunale indsamlingssteder, beholdere til bortkastning af batterier.

## Oplysninger om garanti

Vi yder en garanti på 2 år på pilleæske. Kassebonen gælder som dokumentation. Under garantiperioden vil et defekt termometer blive repareret uden betaling. Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert håndtering, uheld, tilsidesættelse af brugsanvisningen eller omforandringer af termometeret ved tredje part.

## Tegnforklaring

	overholder produktspecifikke EU-retningslinjer
	Anvendelsesdel BF
	Anvisninger til bortskaffelse
	Læs brugsanvisningen
	Produktionsdato (måned/år)

## Salg

SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95,  
14532 Stahnsdorf (Germany)  
www.scala-electronic.de

Rev. 14/01/2021/SE,DK