




## Pastillero con 6 compartimentos de medicamentos y 5 horas de alarma



### Descripción del aparato

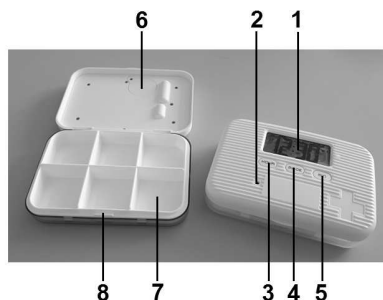

1. Pantalla LCD
2. Abertura para pitidos
3. Tecla de horas
4. Tecla Mode
5. Tecla de minutos & Tecla Start/Stop para el temporizador
6. Tapa del compartimento de la pila
7. Cámaras para pastillas
8. Cierre

### Particularidades

1. Cinco horas de alarma ajustables (se repiten diariamente)
2. Llamada de alerta acústica (pitidos) con vibración simultánea del aparato
3. Seis compartimentos de medicamentos
4. Reloj conmutable de indicación de 12 h a indicación de 24 h y viceversa
5. Temporizador de cuenta atrás (máx. 23 h 59 min)
6. Pastillero en formato de bolsillo de pantalón

### Puesta en servicio

#### Ajuste de la hora

1. Abra el pastillero (mediante el cierre) y saque la tira protectora del compartimento de la pila. El reloj se inicia con 0:00.
2. Ahora, mantenga pulsada la tecla Mode *hasta que* los segmentos de la pantalla LCD parpadeen.
3. Ajuste las horas con la tecla de horas y los minutos con la tecla de minutos.
4. Pulse de nuevo la tecla Mode para concluir el ajuste de la hora.

#### Cambiar de la indicación de 12 h a la indicación de 24 h

Una vez ajustada la hora, puede cambiar con la tecla de horas entre la indicación de 12 h y la indicación de 24 h tantas veces como desee. Recuerde que un cambio sólo se hace perceptible cuando la pantalla LCD muestra, p. ej., P 3:15. La P indica las horas posteriores al mediodía y las horas de la tarde de la hora inglesa. La hora antes del mediodía se indica sin P.

### Ajuste de las horas de alarma

#### Ajuste de la primera hora de alarma:

- Pulse **brevemente** la tecla Mode, en la pantalla LCD se visualiza **--:--** <sup>1</sup>
- Seguidamente, pulse de nuevo la tecla Mode **hasta** que la indicación parpadee.
- Ajuste las horas con la tecla de horas y los minutos con la tecla de minutos.
- Seguidamente, pulse de nuevo la tecla Mode, la primera hora de alarma está programada. A partir de ahora, se repetirá diariamente. No es necesario ajustarla de nuevo.

#### Ajuste de otras horas de alarma.

Cuando haya ajustado la primera hora de alarma y desee ajustar otra, pulse de nuevo **brevemente** la tecla Mode (en la pantalla LCD se visualiza **--:--** <sup>2</sup>) y mantenga pulsada entonces la tecla Mode **hasta** que la indicación parpadee. Ajuste las horas con la tecla de horas y los minutos con la tecla de minutos para la segunda hora de alarma. Pulse de nuevo la tecla Mode, la segunda hora de alarma está programada. Puede repetir este proceso tres veces más para programar las cinco horas de alarma de ser necesario. Con la tecla Mode puede cambiar a la indicación de la hora.

### Borrar una hora de alarma ya ajustada

Seleccione con la tecla Mode la hora de alarma que desee borrar. Seguidamente, pulse la tecla de los minutos, la hora de alarma seleccionada se borra.

### Llamada de alerta

Cuando se llega a la hora de alarma ajustada, se produce una llamada de alerta de 10 segundos con pitidos y vibración del aparato. Seguidamente, la llamada de alerta cambia a pitidos rápidos durante 30 segundos. Si la llamada de alerta sigue sin ser apagada, se emiten pitidos rápidos con vibración del aparato durante 20 segundos.

### Silenciar la llamada de alerta

La llamada de alerta se puede silenciar pulsando cualquier tecla.


### Temporizador de cuenta atrás

Pulse repetidas veces la tecla Mode hasta que cambie al modo de temporizador de cuenta atrás.




Mantenga pulsada la tecla Mode *hasta que* los segmentos de la pantalla LCD empiecen a parpadear. Ajuste las horas con la tecla de horas y los minutos con la tecla de minutos para el tiempo que desee mantener activa la cuenta atrás.

Pulse de nuevo la tecla Mode para concluir el ajuste del tiempo de cuenta atrás.

Con la tecla de los minutos se activa la cuenta atrás (el símbolo  parpadea).

Cuando se llega al último minuto de la cuenta atrás, la pantalla LCD cambia a los segundos restantes.

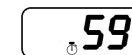

Pulsando la tecla de los minutos, puede detener y reanudar la cuenta atrás tantas veces como desee. Cuando expira el tiempo de cuenta atrás ajustado, el pitido suena durante un máximo de un minuto. El pitido se puede silenciar pulsando cualquier tecla.

### Cambiar la pila

Es necesario cambiar la pila cuando la pantalla LCD o los pitidos se debilitan. Utilice una pila de botón de litio del tipo CR2032. Abra el compartimento de la pila retirando la tapa del compartimento de la pila con ayuda de un pequeño destornillador de estrella. Cambie la pila observando la correcta polaridad. Cierre de nuevo el compartimento de la pila.

### Instrucciones de desecho



Los aparatos defectuosos o que han llegado al final de su vida útil pueden contener residuos que podrían suponer un riesgo para el medio ambiente. Por favor, deseche el aparato adecuadamente en un punto de recogida municipal de equipos eléctricos viejos.

Las pilas se deben desechar adecuadamente. En las tiendas de venta de pilas y en los puntos de recogida municipales se dispone de contenedores apropiados para desechar las pilas.

### Informaciones de garantía

El aparato tiene una garantía de 2 años. El recibo de la compra sirve de certificado de garantía. Durante el periodo de garantía, el aparato defectuoso será reparado gratuitamente. La garantía no cubre los daños que resulten de un manejo inadecuado, accidentes, no observación de las instrucciones de uso o cambios en el aparato por parte de terceros.

### Explicación de los símbolos

	cumple con las directrices de la UE específicas del producto
	Pieza de aplicación BF
	Instrucciones de desecho
	Leer las instrucciones de uso
	Fecha de fabricación (mes/año)

### Importador


SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95,  
14532 Stahnsdorf (Germany)  
www.scale-electronic.de



# Portapillole con 6 scomparti per medicinali e 5 orari di allarme



## Descrizione dell'apparecchio

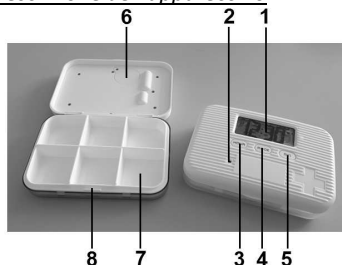

1. Display LCD
2. Apertura per segnali acustici
3. Tasto delle ore
4. Tasto Modo
5. Tasto dei minuti e tasto di avvio / arresto per il timer
6. Coperchio vano batteria
7. Camere per pillole
8. Bloccaggio

## Particolarità

1. Cinque orari di sveglia regolabili (si ripetono quotidianamente)
2. Chiamata di sveglia acustica (segnali acustici) con vibrazione simultanea del dispositivo
3. Sei scomparti per medicinali
4. L'orologio può essere commutato dalla visualizzazione 12 ore alla visualizzazione 24 ore e viceversa
5. Conto alla rovescia (max. 23 ore 59 min)
6. Portapillole tascabile

## La messa in funzione / Regolazione dell'ora:

1. Aprire il portapillole (tramite il fermo) ed estrarre la striscia protettiva dal vano batteria. L'orologio inizia alle 0:00.
2. Premere il tasto Modo *finché* i segmenti del display LCD non lampeggiano.
3. Utilizzare il tasto delle ore per impostare le ore e il tasto dei minuti per impostare i minuti.
4. Premere di nuovo il tasto Modo e l'impostazione dell'ora è completa.

## Cambio dalla visualizzazione 12 ore alla visualizzazione 24 ore

Una volta impostata l'ora, è possibile utilizzare il tasto dell'ora per passare dalla visualizzazione a 12 ore a quella a 24 ore tutte le volte che si desidera. Si noti che un cambiamento è visibile solo quando il display LCD mostra, ad esempio, P 3:15. La P indica le ore pomeridiane e serali dell'ora inglese. L'ora del mattino viene visualizzata senza P.

## Impostazione degli orari della sveglia / Impostazione della prima ora della sveglia:

- Premere **brevemente** il tasto Modo e sul display LCD viene visualizzato **--:--**<sup>▲1</sup>
- Quindi premere nuovamente il tasto Modo *finché* il display lampeggia.
- Utilizzare il tasto delle ore per impostare le ore e il tasto dei minuti per impostare i minuti.
- Quindi premere nuovamente il tasto Modo e viene programmata la prima ora della sveglia. D'ora in poi si ripete ogni giorno. Non ha bisogno di essere regolato di nuovo.

## Impostazione di ulteriori orari di allarme.

Dopo aver impostato l'ora della prima sveglia, premere di nuovo **brevemente** il tasto Modo (appare sul display LCD **--:--**<sup>▲2</sup>), per impostare un'altra ora della sveglia, quindi di nuovo il tasto Modo *finché* il display lampeggia. Utilizzare il tasto delle ore per impostare le ore e il tasto dei minuti per impostare i minuti per la seconda sveglia. Premere il tasto Modo e l'ora della seconda sveglia è programmata. È possibile ripetere questo processo altre tre volte per programmare tutti e cinque gli orari della sveglia, se necessario. Utilizzare il tasto Modo per passare alla visualizzazione dell'ora.

## Cancellare un orario per la sveglia che è già stato impostato

Utilizzare il tasto Modo per selezionare l'ora della sveglia che si desidera eliminare. Quindi premere il tasto dei minuti e l'ora della sveglia selezionata viene cancellata.

## La sveglia

Quando viene raggiunta l'ora di sveglia impostata, viene attivata una chiamata di sveglia di 10 secondi con segnali acustici e il dispositivo vibra. La chiamata di sveglia cambia quindi in bip rapidi per 30 secondi. Se la sveglia non è ancora disattivata, viene emesso un segnale acustico rapido per 20 secondi e il dispositivo vibra.

## Disattivare la sveglia

È possibile disattivare la chiamata di sveglia premendo un tasto qualsiasi.


## Il conto alla rovescia

Premere ripetutamente il tasto Modo fino a raggiungere il modo per il conto alla rovescia.




Premere di nuovo il tasto, *finché* sul tasto Modo non iniziano a lampeggiare i segmenti del display LCD. Utilizzare il tasto delle ore per impostare le ore e il tasto dei minuti per impostare i minuti per la durata del conto alla rovescia.

Premere di nuovo il tasto Modo e l'impostazione del tempo per il conto alla rovescia è completa.

Utilizzare il tasto dei minuti per avviare il conto alla rovescia (il simbolo  lampeggia).

Quando viene raggiunto l'ultimo minuto del conto alla rovescia, il display LCD si commuta ai secondi rimanenti.

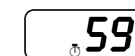


È possibile interrompere il conto alla rovescia tutte le volte che lo si desidera, premendo il tasto dei minuti e lasciarlo correre di nuovo. Dopo che il tempo impostato per il conto alla rovescia è stato raggiunto, il segnale acustico suona per un massimo di un minuto. È possibile disattivare il segnale acustico premendo un tasto qualsiasi.

## Il cambio della batteria

È necessario sostituire la batteria quando il display LCD o i segnali acustici si indeboliscono. Utilizzare una piletta al litio del tipo CR2032. Aprire il vano batteria, rimuovendo il coperchio del vano batteria, servendosi di un piccolo cacciavite a croce. Sostituire la batteria e osservare la polarità durante l'inserimento. Chiudere a questo punto di nuovo il vano batteria.

## Note per lo smaltimento

 Gli apparecchi difettosi o non più utilizzabili al termine della loro durata utile possono contenere dei residui, costituenti un imminente rischio per l'ambiente. Vogliate smaltire l'apparecchio in maniera appropriata presso i centri di raccolta comunali per apparecchiature elettriche vecchie.

Le batterie vanno smaltite in modo appropriato. A tal fine nei negozi che vendono batterie nonché nei centri di raccolta comunali si trovano rispettivi contenitori di raccolta per garantire uno smaltimento appropriato.

## Garanzia:

Si concede una garanzia di 2 anni a partire dalla data d'acquisto. Si garantisce perciò la perfetta proprietà di questo articolo. Durante il periodo di garanzia riediamo gratuitamente tutti i difetti di materiale o produzione. Qualora, contro ogni aspettativa, dovessero verificarsi dei difetti, si prega di spedire l'articolo in stato accuratamente confezionato all'importatore. Affinché la Vostra spedizione possa essere disbrigata rapidamente, si prega di allegare la ricevuta d'acquisto e una breve descrizione dell'errore.

## Spiegazione dei simboli

	è conforme alle direttive UE specifiche del prodotto Likvidace odpadů
	Parte applicativa BF
	Istruzioni per lo smaltimento
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
	Data di produzione (mese/anno)

## Importatore

SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95,  
14532 Stahnsdorf (Germany)  
www.scale-electronic.de