

scala®

Termometro veterinario SC 1080



CE

IT Istruzioni per l'uso

La temperatura attuale viene continuamente indicata durante tutta la misurazione ed il simbolo „°C“ lampeggia. Dopo ca. 20 secondi la misurazione è conclusa.

Il valore di temperatura misurato rimane visualizzato sul display fino allo spegnimento del termometro. Dopo l'uso, si raccomanda di spegnere l'apparecchio, premendo brevemente il tasto I/O. Successivamente si sente di nuovo un segnale acustico. Se l'apparecchio non viene spento, dopo ca. 3 minuti si sente un segnale acustico e l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

Indicazione dell'ultimo valore di misura

Mantenendo premuto più di 3 secondi tasto I/O all'accensione dell'apparecchio, sul display viene visualizzato l'ultimo valore misurato. Non appena si rilascia di nuovo il tasto I/O, l'apparecchio si commuta automaticamente al modo di disponibilità di misurazione.

Test di funzione

La corretta funzione del termometro viene automaticamente verificata ogni volta all'inserimento. Vengono visualizzati tutti i segmenti e successivamente L°C. Se viene localizzata una funzione erronea (imprecisione di misura), sul display verrà visualizzato „Err“ (errore).

Pulizia e disinfezione

Il termometro per piccoli animali SC 1080 è impermeabile.

Si prega di notare che l'impermeabilità non significa che il dispositivo sia anche a tenuta di disinfettanti e solventi aggressivi!

Disinfettanti	Produttore	applicazione
Kodan® Tücher	Schülke & Mayr	Secondo le informazioni del produttore per la plastica superfici
EuroSept® Max Wipes	Henry Schein Inc.	
Medizid Rapid	Rösner-Maut by Meditrade GmbH	
Helipur® H plus N	B. Braun Melsungen	

Garanzia:

Si concede una garanzia di 2 anni a partire dalla data d'acquisto. Si garantisce perciò la perfetta proprietà di questo articolo. Durante il periodo di garanzia riediamo gratuitamente tutti i difetti di materiale o produzione. Qualora, contro ogni aspettativa, dovessero verificarsi dei difetti, si prega di spedire l'articolo in stato accuratamente confezionato al produttore. Affinché la Vostra spedizione possa essere disbrigata rapidamente, si prega di allegare la ricevuta d'acquisto e una breve descrizione dell'errore.

Particolarità

Il termometro veterinario SC 1080 è un:


- veloce (risultato della misurazione dopo 15-25 secondi),
- impermeabile,
- Termometro di massima
- con ampio display LCD.

L'ultimo valore misurato viene salvato e il dispositivo è dotato di una batteria per circa 2000 misurazioni.

Informazioni di sicurezza


- ◆ L'SC 1080 è inteso solo per misurare la temperatura corporea di animali di grossa taglia.
- ◆ Il termometro contiene minuterie (batterie, ecc.), che possono essere ingerite dai bambini. Pertanto, si raccomanda di custodire le batterie e il termometro al di fuori della portata di bambini.
- ◆ Proteggere il termometro contro l'esposizione ai raggi solari e temperature oltre 50°C.
- ◆ Non lasciare cadere il termometro, non piegarlo e non aprirlo (salvo lo scompartimento, per cambiare le batterie).

Panoramica dell'apparecchio

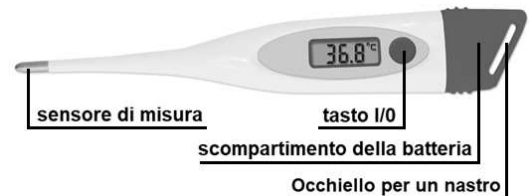

Istruzioni per l'uso

Per l'accensione occorre premere il tasto I/O. Un breve segnale acustico indica lo stato di „accensione“. Successivamente avviene un cosiddetto test dei segmenti (controllo se tutti i segmenti del display possono essere visualizzati correttamente) e un test funzionale interno (si veda al paragrafo „Test di funzione“).

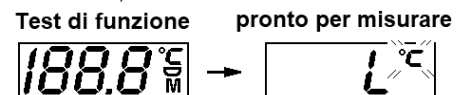

In una temperatura registrata dal sensore di meno di 32°C viene quindi visualizzata la „L“ e la „°C“. Dopo ca. 1 secondo la „°C“ incomincia a lampeggiare. La „L“ sta per low (basso – meno di 32°C).

Dati tecnici

Tipo	termometro massimo
Campo di misura	32,0°C fino 43,9°C, temperatura al di sotto di 32,0°C: Indicazione „L“ per low (troppo bassa), temperatura al di sopra di 43,9°C: Indicazione „H“ per high (troppo alta).
Precisione di misurazione	0,1°C tra 35,5°C fino 42,0°C ad una Temperatura ambientale da 18°C fino 28°C.
Autotest:	Controllo automatico interno del valore di test 37,0°C. In caso di una deviazione > 0,1°C, viene visualizzato „Err“.
Batteria tipo	1 unità: LR 41 oppure SR 41
Temperatura di conservazione	0°C fino 50°C.

Cambio della batteria

Non appena sul display viene visualizzato il simbolo, significa che si è scaricata la batteria e che deve essere cambiata. Procedere a tal fine nel modo seguente: Rimuovere il coperchio dello scompartimento della batteria, staccandolo. A questo punto è accessibile la batteria. Rimuovere la batteria esaurita servendosi di un oggetto ausiliare appuntito (pinzetta, piccolo cacciavite, ecc.) e inserire quindi la nuova batteria (LR 41 o SR 41).

Informazioni sullo smaltimento

Quando l'apparecchio un giorno non serve più, si raccomanda di smaltirlo in modo appropriato attraverso i centri di raccolta comunali di apparecchiature elettriche.

Le batterie scariche devono essere smaltite in modo appropriato. A tal fine nei negozi che vendono batterie nonché nei centri di raccolta comunali si trovano rispettivi contenitori di raccolta per garantire uno smaltimento appropriato.

Spiegazione dei simboli

	Produttore
	Conforme alle direttive UE
	Parte applicata tipo BF
	Nota sullo smaltimento
	Periodo di produzione mese/anno
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Straße 95
14532 Stahnsdorf
www.scala-electronic.com