

## DIGITALES FIEBERTHERMOMETER (BLAU)

SC 17



### Digitales Fieberthermometer SC 17 (Blau)

- 60 Sek. Messzeit,
- Speicherung des letzten Messergebnisses,
- Signalton,
- wasserdicht.

Das SC 17 ist ein Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 60 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt.

Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert. Um den letzten Messwert anzuzeigen, halten Sie die Einschalttaste des Thermometers mindestens drei Sekunden lang gedrückt. Nach Loslassen der Einschalttaste ist das Thermometer bereit für die nächste Messung.



EAN 4022356170028

PZN - 06826296

Art.-Nr.: 01048

CE

0197

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

## DIGITALES FIEBERTHERMOMETER (BLAU)

SC 17

### Spezifikation

Messbereich	32,0°C ~ 43,9°C
Auflösung	0,1°C
Abweichung	±0,2°C bei einer Temperatur < 35,5°C ±0,1°C bei einer Temperatur 35,5°C < T < 42°C ±0,2°C bei einer Temperature >42°C
Display	LCD-Display, 3 digits
Arbeits Temperatur	Temperatur: 10°C bis 40°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Lager Temperatur	Temperatur: 0°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Batterie Info	1 Stck, LR 41 (1,5V), Kapazität 30mAh, Gewicht 0,6gr
Batterie-Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpf" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Abschaltung	Automatisch nach 3 Minuten
Abmessung	126,5 x 19,9 x 9,3 mm
Gerät Gewicht	11,6 g mit Batterie
Fabre	Weiß/blau
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch, Rumänisch



### Logistische Details

	Menge in St/Kg	Netto Gewicht (Kg)	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,025	0,05	17,6x5,5x1,8 cm
Innerkarton	10	0,25	0,5	30x9x5,3 cm
Umkarton	100	2,5	5,4	37x23x33 cm
Lage	1000	25	54	120x80x33 cm
Palette	5000	125	290	120x80x194 cm

EAN 4022356170028

PZN - 06826296

Art.-Nr.: 01048

CE  
0197

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)