

KI-8280

110 (L) *65 (W) *172 (H) mm

Infrarot-Stirn-Thermometer Non-contact Thermometer

SC 8280

Specification / Technische Daten

Measurement Sites	Forehead and Object
Measurement Distance	3-8cm
Measuring Range	Forehead Mode: 32.2-43.3°C Object Mode: 0.0°C - 90.0°C
Messbereich	Körpertemperatur: 32,2°C bis 43,3°C Temperatur von Gegenständen: 0,0°C bis 90,0°C
Accuracy Messgenauigkeit	34.0°C - 43.0°C : ±0.3°C ,Other : ±0.4°C Körpertemperatur : ±0,3°C Temperatur von Gegenständen: ±0,4°C
Measurement Time Messzeit	1 second 1 sekunde
Memory	10 sets
Speicherplätze	10
Function Fieberalarm	Fever Alarm ab 37,5°C akustisch
Power Source	R03(AAA) battery x 2pcs
Batterie-Typ	2 Stück AAA
Low Battery Batterie-Anzeige	Battery is low when this "■ ■" symbol shown Das Symbol "■ ■" zeigt Batterie als erschöpft an
Auto Power Off Auto Power OFF	After 1 minute nach ca. 1 Minute



SC 8280



Infrarot-Stirn-Thermometer

SC 8280

Schnell-Start

- Legen Sie die Batterien entsprechend der vorgegebenen Polarität in das Batteriefach.
- Drücken Sie kurz auf die Ein/Mess-Taste. Sie hören einen Piep-Ton. Wenn die Sanduhr auf der LCD-Anzeige erscheint, startet der Messvorgang. Sie hören nun zwei Piep-Töne.
- Platzieren Sie den Infrarot-Sensor ca. 5 cm vor der Stirn über der Nasenwurzel. Drücken Sie auf die Ein/Mess-Taste um die Messung auszulösen.
- Lesen Sie das Messergebnis auf der LCD-Anzeige ab.



Importeur/Importer
SCALA Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Straße 95
14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.de

Infrarot-Stirn-Thermometer Non-contact Thermometer

SC 8280

scala



Infrarot-Stirn-Thermometer
Non-contact Thermometer
SC 8280

Das Thermometer ermittelt die Körpertemperatur an der Stirn durch Auswertung der Infrarotstrahlung. Es kann sowohl bei erwachsenen Patienten als auch bei Kindern und im häuslichen Bereich eingesetzt werden.

The thermometer is designed to absorb the infrared from human body to detect your temperature. It can be used with adult or pediatric patients and it can be used in household.

CE 0197



RoHS
comform symbol



Non-contact Thermometer

SC 8280

How to Operate

- Install battery into the device. Make sure the polarity (+ and -) of the battery matches as shown in the battery compartment.
- Press and release the ON/OFF button, you will hear a short beep. The measuring process will begin after the hourglass disappears, you hear two short beeps.
- Aim the Probe toward the forehead or object approximately 5cm from surface, then press and release the ON/OFF button to record the measurement.
- Read the temperature on the display.



K-jump Health Co., Ltd.
No. 56, Wu-Kung 5th Rd.
New Taipei Industrial Park
New Taipei City, 24890 Taiwan

CELEBO
Polgreen Germany GmbH
Ruhlsdorfer Straße 95
14532 Stahnsdorf, Germany

REV.20200319
PN.